

Netti[®]
BY ALU REHAB

Enable joy of life



NETTI S



Es sind die Momente der Freude die den Unterschied machen

Wir bei Netti sind der Überzeugung, dass eine Sitzlösung auf der Basis einer gründlichen Auswertung mit Fokus auf den Bedarf des Nutzers konfiguriert werden sollte. Unser Fokus liegt darauf 'Lebensfreude zu ermöglichen' und alle Produkte sind so konzipiert, dass sie die Mobilität des Benutzers erhalten oder verbessern, sowie die Teilnahme an den Aktivitäten des täglichen Lebens erleichtern.

AKTIV UND GESUND

Netti S ermöglicht dem Kind eine bessere Sitzposition zu erreichen, dies trägt zur Besserung der wichtigen Lebensbereiche wie Atmung, Kommunikation und Aktivität bei und ermöglicht auch den engeren Kontakt zu Familie und Freunde. Die Netti Philosophie ist einzigartig und sichert eine optimale Sitzposition den ganzen Tag. Es ist einfach den Sitz- und Rückenwinkel zu verändern, um eine Variation der Sitzposition zu sichern. Eine optimale Körperhaltung und Sitzvariation entlastet Druck auf den Risikobereichen und beugt somit Dekubitus vor.



UNTERWEGS

Netti S gibt dem Benutzer viele Glücksmomente, weil der Nutzer an einem sonnigen Tag leichter und sicherer mit Familienmitgliedern oder Betreuern im Auto unterwegs sein kann. Der Rollstuhl ist crashgetestet und für den Autotransport vorbereitet, so sind also erholsame Strandbesuche, Spaziergänge oder Familienbesuche möglich.

FÜR WEN EIGNET SICH DER NETTI S?

Netti S ist ein Multifunktionsrollstuhl für teilweise oder vollständig immobile Kinder und Jugendliche mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen. Netti S hat einen einstellbaren Sitz- und Rückenwinkel, welches die Veränderung der Sitzposition, der Mobilität oder Stabilität erleichtert für Nutzer mit folgenden Herausforderungen:



- Eingeschränkte oder fehlende Mobilität
- Begrenzte oder fehlende Muskelkraft
- Eingeschränkte oder fehlende Rumpf- und Körperstabilität
- Halbseitenlähmung
- Rheumatische Erkrankung
- Schädel-Hirn-Verletzungen
- Amputationen
- Verschiedene neurologische Störungen



Die zeitlosen Farben und Materialien des Netti S Rollstuhls und seine Kissen wurden mit Haltbarkeit und Langlebigkeit im Auge ausgesucht.

Mit dem Wunsch an ein längeres und besseres Sitzen

Wie kommt man dem Wunsch an ein längeres und besseres Sitzen in einem Rollstuhl entgegen? Durch ein ergonomisches Design, das Synergien zwischen dem Stuhl, den Kissen und dem verschiedenen Zubehör schafft, so dass eine optimale Sitzposition über einen längeren Zeitraum gesichert werden kann.

Eine gute Beckenstabilität ist einer der wichtigsten Faktoren, die es zu kontrollieren gilt, wenn man in einem Rollstuhl sitzt. Diese Stabilität erreicht man beim Netti S durch das Zusammenwirken einer Reihe von fortschrittlichen Konstruktionsmerkmalen.

- Sitzkissenaufbau aus Schichten verschiedener Materialien, die den Sitzkomfort und eine gute Positionierung unterstützen sowie Druck entgegenwirken.
- Anpassrücken mit individuell verstellbaren Bändern zur Schaffung von Halt und Stabilität. Dies sichert eine optimale Positionierung für jedes Kind, da wir alle einen unterschiedlichen Rücken haben.
- Drehpunktpositionen der Beinstützen und der Rückenlehne stellen sicher, dass die gute Sitzposition auch während verschiedener Anpassungen oder Einstellungen des Stuhls beibehalten wird.
- Die Form des Rückenkissens sorgt für Positionierung, Stabilität und großen Komfort.
- Eine große Auswahl an Zubehör, wie Komfortpolster, Abduktionskeil, Seitenpelotten, Beckengurte und Oberkörpergurte sorgen für eine optimale Sitzqualität.

Es ist die Liebe zum Detail, die einen Netti Stuhl auszeichnet.
Es ist das, was dem Kind oder Jugendlichen mehr Momente der Freude ermöglicht.

DRUCKVERTEILUNG

Das Standard Sitzkissen verteilt Druck- und Scherkräfte korrekt, vermeidet ein Vorwärtsgleiten des Benutzers und ist mit einem 3D-Bezug zur Optimierung des Mikroklimas ausgestattet. Diese Faktoren tragen zur Minimierung des Risikos eines Druckgeschwürs bei.



STABILITÄT UND BEWEGUNGSFREIHEIT

Das Rückenkissen stabilisiert zusammen mit dem einstellbaren Anpassrücken das Becken, gleichzeitig ist eine korrekte Positionierung des Rumpfes möglich. Die Form des Rückenkissens bietet Platz für Bewegung der Schultern.



VARIATION DER SITZPOSITION

Durch den großen Sitzneigungsbereich von -3° bis $+35^\circ$ bietet Netti S eine gute Variation der Sitzpositionierung zur Sicherstellung einer optimalen Druckverteilung und Schutz der Haut. Dem Kind kann sowohl eine aktive als auch eine entspannende Sitzposition gegeben werden.



Enable joy of life



Wächst mit dem Kind

Kinder wachsen schnell, und aus diesem Grund haben wir den Netti S Rollstuhl mit vielen Verstell- und Anpassungsmöglichkeiten ausgelegt. Netti S ist ein Rollstuhl der im Laufe der Zeit, wenn das Kind wächst, leicht anzupassen ist, somit ist dem Kind immer eine ergonomische Sitzposition gesichert.



250-440 mm

SITZTIEFENFLEXIBILITÄT

Die Sitzplatte des Stuhls kann ohne extra Anbauteile um bis zu 100 mm in der Tiefe verstellt werden (Sitzbreite 250 mm, jedoch nur 75 mm), wodurch dem wachsenden Kind ein guter Sitzkomfort gesichert wird. Netti S Rollstühle in Sitzbreite 350 können mit einer 90 mm Sitzplattenverlängerung von 250 bis 440 mm in der Tiefe eingestellt werden.



- 70 mm

SITZBREITENFLEXIBILITÄT

Die Stabilität des Beckens ist wichtig, um eine stabile Sitzposition zu schaffen. Sitzbreitenreduzierungspolster sichern die Stabilität in dem diese die Sitzbreite um bis zu 70 mm reduzieren können. Diese können auch verwendet werden, um genug Raum für Wachstum zu geben.



220-320 mm

FLEXIBLE BEINLÄNGE

Die Stabilität des Beckens beginnt bei den Füßen. Wenn Sie eine optimale Stabilität sichern wollen, dann ist es wichtig mit einer stabilen Basis für die Füße anzufangen. Deswegen bietet die Netti Beinstütze maximale Flexibilität. Die Unterschenkelhöhe der Standard Beinstütze kann für eine Unterschenkelhöhe von 220 bis 320 mm eingestellt werden. Mit den winkelverstellbaren Beinstützen kann die Beinstütze sogar an einer Länge von 390 mm angepasst werden.



400-600 mm

ANPASSUNG DER RÜCKENHÖHE

Netti S wird mit einem einstellbaren Anpassrücken geliefert, mit dem Sie den Rücken an die genaue Form des Rückens des Kindes anpassen können. Das Rückenkissen hat eine Höhe von 400 mm und kann um bis zu 100 mm für eine Rückenlänge von 500 mm nach oben versetzt werden. Zur zusätzlichen Unterstützung von größeren Benutzern kann eine Rückenverlängerung für eine Rückenlänge von 500-600 mm montiert werden.

Enable joy of life



Keine zwei Menschen sind gleich

Wir sind stolz darauf, dass wir ein variantenreiches Rollstuhl-Sortiment und zudem das größte Zubehörprogramm im Markt anbieten. Wir passen den Rollstuhl an den Nutzer an und nicht umgekehrt. Dies ist der Grund warum wir so viele Anpassungs- und Zubehöroptionen für den Netti S anbieten.

EINE VIELZAHL VON GURTOPTIONEN

Das Design von Netti S ermöglicht eine optimale Anbringung von sekundären Positionierungshilfsmitteln wie Hüft- und Oberkörpergurte entsprechend den Bedürfnissen des Nutzers. Ein Hüftgurt kann so z.B. in vielen verschiedenen Winkeln und Positionen (horizontal, vertikal oder angewinkelt) angebracht werden. Dies vereinfacht die Lösung verschiedener Sitzherausforderungen.



VIELE BEINSTÜTZENOPTIONEN

Netti S hat als Standard Universal Beinstützen, dies macht den Stuhl perfekt für Nutzer mit kurzen Kniesehnen. Kurze Kniesehnen sind eine der Hauptursachen für Fehlstellungen, da das Becken aus der Neutralposition herausgezogen wird und dies führt zu einer inkorrekten Sitzposition, Dekubitus, Schmerzen etc. Der Netti S Rollstuhl kann auch mit winkelregulierbaren Beinstützen, einem Fußkasten sowie dynamische Beinstützen ausgestattet werden.

VIELE RÜCKENOPTIONEN

Netti S wird mit einem einstellbaren Anpassrücken geliefert, mit dem Sie den Rücken an die genaue Form des Rückens des Kindes anpassen können, dies ermöglicht eine gute Sitzposition und Stabilität des Beckens in dem genug Raum und Unterstützung für den Oberkörper gegeben wird. Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Schaumstoff-Rückenkissen mit verschiedener Stärke in der seitlichen Unterstützung sowie ein festes Rückensystem für zusätzlichen Unterstützungsbedarf bei posturaler Asymmetrie. Für Nutzer mit unfreiwilligen Bewegungen ist eine dynamische Rückenlösung auch erhältlich.



VIELE KOPFSTÜTZENOPTIONEN

Kommunikation mit der Umgebung ist für alle Menschen wichtig. Eine gute Kopfhaltung ist wichtig, damit Sie in der Lage sind mit Ihren Freuden zu sprechen und sie anzugucken, damit Sie frei atmen und problemlos essen und trinken können. Eine Vielzahl von Kopfstützen passen zu diesem Rollstuhl, um individuelle Bedürfnisse entgegen kommen zu können.



Dokumen-
tierter Effekt

NEUPOSITIONIEREN ERHÖHT DEN KOMFORT

Durch Neupositionierung werden die Druckpunkte verschoben und der Druck unterschiedlich verteilt, so kann eine Druckentlastung erreicht werden. Netti S ermöglicht eine häufige Neupositionierung des Kindes oder Jugendlichen mit einem optimierten Sitzgebungsbereich für sowohl Aktivität (-3°) und Entspannung (35°).

In the Netti S you can preserve a correct seating position and postural control, to reduce contact pressure and shear force, and create support in order to prevent pressure ulcers.

Lesen Sie mehr auf www.My-Netti.de



Vorteile für die Begleitperson



Die Armlehne kann für den einfachen Transfer unter Sitzplattenebene gesenkt werden. Ablesbare Skalen für Höheneinstellung.

CM
18

Ergonomisch geformter und höhenstellbarer Schiebebügel, welcher einfach nach unten gefaltet werden kann, um die Gesamtlänge des Rollstuhls in engen Bereichen zu verkleinern oder um den Abstand zwischen Nutzer und Begleitperson zu mindern. In zwei Längen erhältlich.

Hervorragende Fahreigenschaften durch die Platzierung und den 4° negativen Sturz der Antriebsräder.

Benutzerfreundliche und sichere kombinierte Hand- und Fußbremse.

Einfache Handhabung - intuitive Bedienung und Funktion



EINFACHE EINSTELLUNG DER SITZKANTELUNG MIT ABLESBAREN SKALEN



Der Rollstuhl kann einfach gefaltet werden und passt in den meisten Autos.

EINFACH FALTBAR FÜR AUTOTRANSPORT ODER AUFBEWAHRUNG

Dynamische Funktionen bei Netti Dynamic S

Unwillkürliche Bewegungen sind oft eine Herausforderung für den Nutzer als auch für die Begleitperson. Durch das nach-vorne Gleiten und der inkorrekten Sitzposition wird das Risiko für Dekubitus, Unbehagen und der Bedarf an Repositionierung erhöht.



Dem kann durch dynamische Sitzlösungen für den Benutzer entgegengewirkt werden. Die dynamische Version vom Netti S Rollstuhl, Netti Dynamic S, ist geeignet für unruhige Anwender, für Anwender, die den Körper selbst ein wenig bewegen möchten oder für Anwender mit Streckspasmen oder unwillkürlichen Bewegungen in der Hüfte oder im Rückenbereich.

- Dynamische Rückeneinheit
- Dynamische Sitzeinheit
- Dynamische Beinstütze

WARUM EINE DYNAMISCHE LÖSUNG WÄHLEN?

- Bewegung zulassen
- Kräfte verteilen
- Erhöhte Haltungskontrolle
- Spastizität minimieren
- Längere Lebensdauer des Rollstuhls
- Verlängerung der Gesamtzeit im Rollstuhl pro Tag
- Schutz der Haut durch eine Minimierung von Gleiten und Scherung
- Bessere Nahrungsaufnahme und Atmung durch optimale Sitzposition
- Wenigere Schmerzen



DOKUMENTIERTER EFFEKT VON DYNAMISCHEN LÖSUNGEN

Klinische Tests zeigen, dass dynamische Optionen die Lebensqualität des Benutzers steigern. Da dem Nutzer die Möglichkeit gegeben wird längere Zeit im Rollstuhl in einer guten Sitzposition zu sitzen, so dass die Teilnahme am Alltag erleichtert wird.

Hier sehen Sie einige der dokumentierten Effekte:

- Verhinderung des Risikos von Dekubitus
- Wenigere Schmerzen
- Bessere Lungenkapazität
- Vorbeugen von Deformitäten der Wirbelsäule
- Aufrechterhaltung einer stabilen und aufrechten Position
- Verhinderung von Gleiten und Scherung
- Reduzierung des Kraftaufwandes vom Nutzer auf den Rollstuhl

Lesen Sie mehr auf www.My-Netti.de



STANDARDKONFIGURATION

Netti Smart Rückenkissen

- Netti Smart mit integrierter Lumbalunterstützung und 120 mm Seitenführung
- Atmungsaktiver 3D Bezug im zeitlosen Rot/Schwarz Design.
- Das Rückenkissen hat eine Höhe von 400 mm und kann um bis zu 100 mm für eine Rückenhöhe von 500 mm nach oben versetzt werden.

Netti S Sit Sitzkissen

- Das Sitzkissen Netti S Sit hat eingearbeitete Seitenführungen, laterale Unterstützung und Abduktion.
- Atmungsaktiver 3D Bezug

Armlehne

- Höheneinstellbar
- Kann für den einfachen Transfer unter Sitzplattenebene gesenkt werden
- Ablesbare Skalen für die Höheneinstellung
- Armpolster 330x55 mm
- Kleiderschutz

Schiebebügel

- 500 mm
- Höhen- und tiefeneinstellbar
- Faltbar

Räder

- 22" schwarze, pannensichere PU Antriebsräder mit Trommelbremse für Begleitperson
- 4° negativen Sturz
- 6" schwarze PU Lenkräder

Bremsen

- Einfach bedienbare kombinierte Hand- und Fußbremse
- Trommelbremse

Beinstützen

- Universal Beinstützen mit Fußbrett, schwarz Unterschenkellänge 220-320 mm
- Fersenband
- Winkeleinstellbar für eine Positionierung im festen Winkel
- Einstellbar unter 90° für kontrakte Beinstellung

Kippsicherungen

- Höhen- und längeneinstellbar, drehbar.
- Können als Ankipphilfe verwendet werden.

Technische Daten



250, 300, 350 mm
(-70 mm)



250-450 mm



400 mm
(600 mm)



470 mm



-3° - +35°



90°-125°



75 kg



21,1-26,5 kg



Max.
75 kg

Mit der Netti Methode Lebensfreude schaffen

Wir bei Netti glauben, dass eine Rollstuhlanpassung nur nach einer gründlichen Bewertung der Bedürfnisse des Nutzers vorgenommen werden kann. Unser Fokus liegt darauf, Lebensfreude zu ermöglichen und die Teilnahme an den Aktivitäten des Alltags zu erleichtern.



DIE OPTIMALE SITZLÖSUNG FINDEN

Um Ihnen bei der Konfiguration der optimalen Sitzlösung zu helfen, haben wir die Netti 5 Seating Steps entwickelt. Die 5 Seating Steps führen Sie durch den Prozess, damit Sie sicher sind alle relevanten Aspekte berücksichtigt zu haben. Wir möchten Sie dazu auffordern, diese Schritte in Ihrer täglichen Arbeit zu verwenden – Sie finden den Versorgungskonzeptbogen auf unserer Webseite zum Download www.My-Netti.de.

Die Schritte zur Konfiguration einer optimalen Sitzlösung sind:

1. Erwartungen und Herausforderungen abklären
2. Die Situation vom Nutzer beobachten und beurteilen
3. Die Sitzstrategie festlegen inkl. SMART Ziele
4. Die Sitzlösung konfigurieren
5. Bewerten

Enable joy of life

KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE:

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry

Aus Deutschland:
T: 0800 888 4560
F: 0800 888 4568
info@My-Netti.com

Aus Österreich / der Schweiz:
T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
info@My-Netti.com

Enable joy of life

